



使用说明书的补充页

# Leica CV5030

## 自动盖片机

使用说明书补充页  
Leica CV5030, V 3.3 修订版 J, 中文版 – 2016 年 7 月  
2015-001 CV5030 补充页 V 1.0 修订版 D – 2016 年 7 月

本档务必与仪器放在一起。  
使用仪器前请仔细阅读。



## 新章节 5.4.1 HistoCore SPECTRA ST 槽固定器



要在盖片机 CV5030 上容纳 30 个样品，槽固定器和夹具需要与 HistoCore SPECTRA ST 样品玻片架配合使用。



- 为避免损坏样品，请勿将样品载玻片插入到已经安装夹具的样品架上。
- 夹具只能在样品架从 SPECTRA ST 上取下后安装。在染色过程中使用夹具会导致设备内部发生碰撞，造成染色过程中断。
- 必须先将样品玻片架手柄(1, 图 C)从样品玻片架上取下，然后再将其插入 CV5030。



图 A

### 为 HistoCore SPECTRA ST 槽固定器准备 CV5030

- 打开 CV5030 的装载抽屉(参见章节 4.10, 图 27)，将装载槽向前拉出。
- 取下现有的槽固定器，检查是否有玻璃碎片，必要时进行清洁。
- 将 HistoCore SPECTRA ST 槽固定器(参见图 A)插入装载槽。

### 将夹具安装到样品玻片架

- 从 HistoCore SPECTRA ST 取下样品玻片架。
- 展开样品玻片架手柄，呈一定角度握住样品玻片架(图 B)。
- 将夹具小心地放在样品载玻片上方，注意每个夹具槽中只能放置一个样品载玻片(参见图 C)。
- 将样品玻片架向后水平放置。
- 使用双手同时小心地按下夹具，直至其卡入到位(图 C)。
- 取下样品玻片架手柄(1, 图 C)。
- 打开 CV5030 的装载抽屉，将样品玻片架插入 HistoCore SPECTRA ST 槽固定器。
- 如章节 5.5 所述，对样品载玻片进行盖片。



图 B

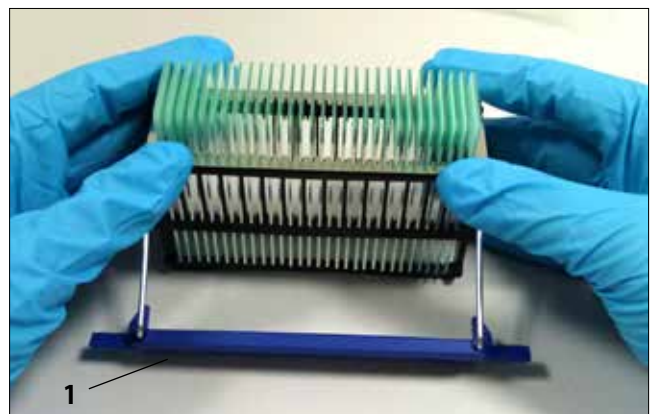


图 C

章节 9.1 选配件的新增项目

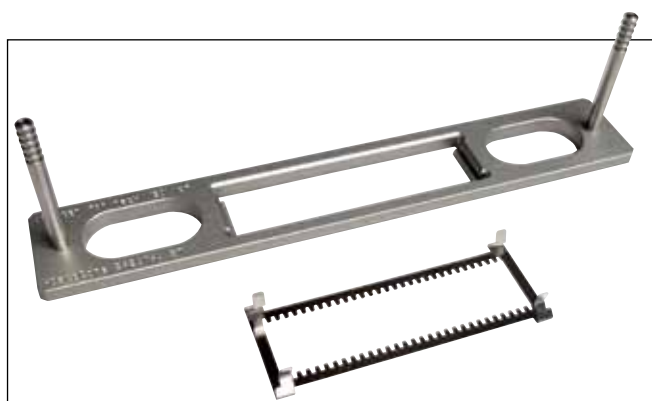


图 D

**HistoCore SPECTRA ST Rack 30 适配器套件,**  
用于容纳 30 张样品载玻片的徕卡样品玻片架  
包含:

1 个适配器 14 0478 54396

1 个夹具 14 0478 55510

订单号 14 0478 55522

**HistoCore SPECTRA ST Rack 30 夹具套件,**  
包含 2 个夹具

订单号 14 0478 55510

**HistoCore SPECTRA ST Rack 30 适配器,**  
用于容纳 30 张样品载玻片的徕卡样品玻片架

订单号 14 0478 54396



[www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)



Leica Biosystems Nussloch GmbH  
Heidelberger Straße 17-19  
D- 69226 Nussloch  
电话: +49 6224 - 143 0  
传真: +49 6224 - 143 268  
网址: [www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)